


MASCHERINE MEDICHE • MONOUSO DISPOSABLE • MEDICAL MASKS

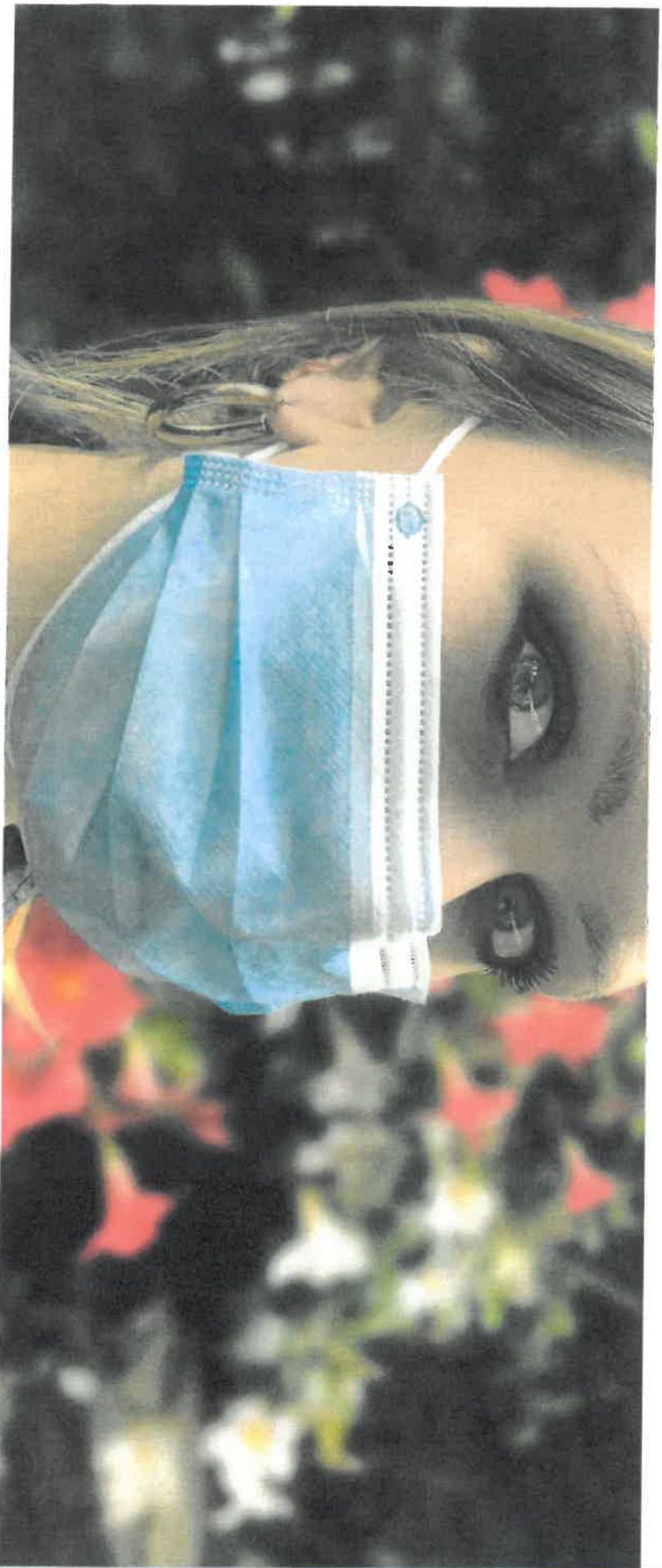



DETTAGLI COSTRUTTIVI

STRUCTURAL DETAILS

La nostra mascherina medica di tipo chirurgico è conforme agli standard
Our surgical medical mask meets standard

CE
EN 14683

MUM
MUNNUS MEDICAL

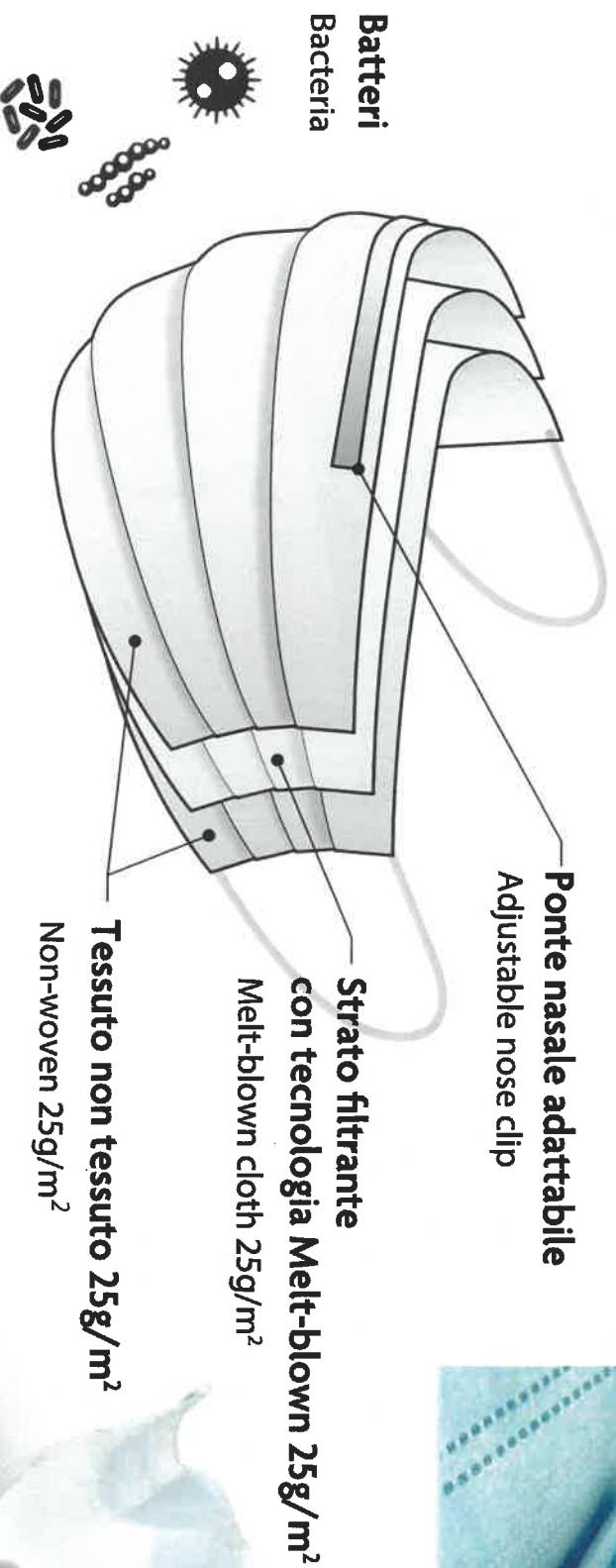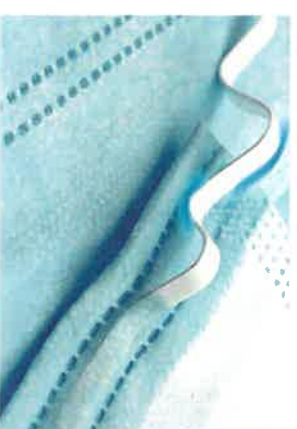

Efficienza di Filtrazione Batterica $\geq 98\%$
Bacterial Filtration Efficiency $\geq 98\%$



FUNZIONE DEL PRODOTTO

FUNCTION OF THE PRODUCT



- ▮ **Traspirante e confortevole**
Breathable & Comfortable
- ▮ **Struttura protettiva triplo strato**
3-layered Structure Protection
- ▮ **Adatta per pelli sensibili**
Suitable for Sensitive Skin
- ▮ **Senza fibra di vetro**
Without fiberglass
- ▮ **Conveniente e igienica**
Convenient and hygienic

CERTIFICAZIONE



I nostri modelli di mascherina medica sono Dispositivi Medici registrati presso il Ministero della Salute seguendo tutte le procedure standard per la corretta produzione, marcatura e distribuzione di questa tipologia di prodotto.

Sono regolarmente marcati CE in rispetto di tutte le Normative e Direttive europee.

I numeri di registrazione assegnati ai Dispositivi visibili presso il sito del **Ministero della Salute** sono **1946624** e **1946619**.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I Dispositivi Medici oggetto di questa presentazione sono mascherine non sterili in 3 strati, prive di lattice, anatomiche, destinate a essere indossate dagli operatori sanitari durante un intervento chirurgico o altre attività in ambito sanitario o da altri utilizzatori, in altri ambienti, al fine di evitare la dispersione di agenti patogeni (quali ad esempio batteri o virus) dispersi in goccioline liquide (droplets) e aerosol che possono fuoriuscire dalla bocca e dal naso di chi le indossa. La mascherina infatti serve per evitare contaminazioni da e verso il paziente e proteggere le vie respiratorie da polvere, spray e altro materiale che viene utilizzato durante un'attività medica.

Il Dispositivo può essere impiegato nell'uso domestico soprattutto in condizioni di affollamento e in ambienti chiusi. Può essere destinato anche all'uso professionale diverso da quello medico, in particolare con riferimento ai settori food, beverage e beauty o per altri impieghi all'interno di uffici e aziende in rispetto delle specifiche normative vigenti al momento.

Ogni mascherina è unisex, in taglia unica e impacchettata in busta da 50 pezzi sfusi contenuta in scatola serigrafata o in 5 buste da 10 pezzi ciascuna contenente manuale d'uso sigillato in bustina che lo separa dai dispositivi in scatola serigrafata. Colore della mascherina: bianco per il lato viso e azzurro per il lato mondo. Il dispositivo medico è di classe I monouso Tipo II.





DATI TECNICI

Strati: 3 - Materiali: strato 1 (esterno): TNT in PP 25 g/m² idrorepellente, strato 2 (intermedio): filtro melt-blown 25g/m², strato 3 (interno): TNT in PP 25g/m² - Dimensioni (mm): 175 x 95 - Peso (gr): 2,7 - Tipo in conformità alla norma UNI EN 14683:20: Tipo II - Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%): ≥ 98 - Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40 - Pulizia Microbica (ufc/g): ≤ 30

MODO D'USO

USAGE METHOD

MM[®]
MUNUS MEDICAL

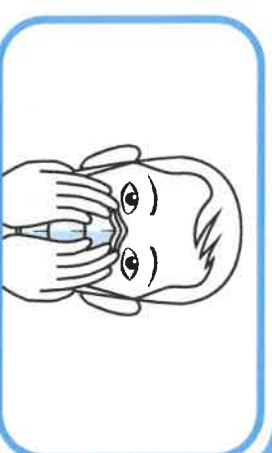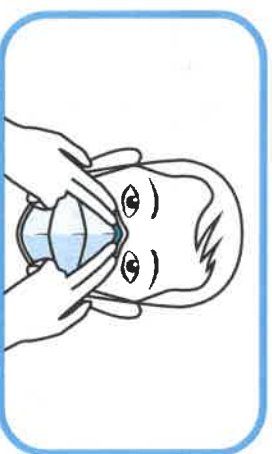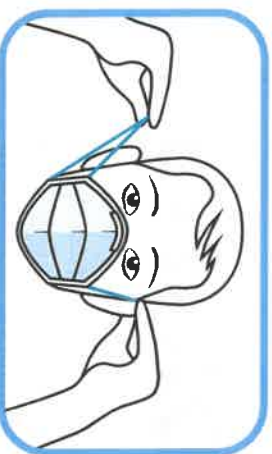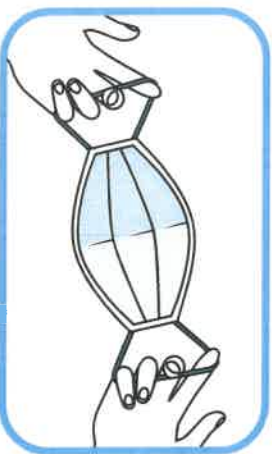

1. Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone.
2. Rimuovere la mascherina dalla confezione.
3. Visualizzare il lato esterno della mascherina in blu più scuro, quello interno in bianco e la parte superiore con ponte nasale regolabile.
4. Indossare la mascherina posizionando uno alla volta gli elastici dietro le orecchie.
5. Premere con le dita il filetto di metallo su ambo i lati in modo che possa aderire alla forma del naso.
6. Tirare la parte inferiore della mascherina verso il basso per coprire completamente naso, bocca, mento.
7. Mentre si indossa e mentre si toglie la mascherina, evitare di toccare la superficie esterna con le mani e, se proprio necessario, effettuare il lavaggio delle mani dopo aver toccato la mascherina.

1. Sanitise hands by washing them thoroughly with soap water.
2. Remove the mask from the package.
3. The outer side of the mask is darker blue, the inner side is white and the top has an adjustable nose clip.
4. Put on the mask, placing the elastic bands behind the ears one at a time.
5. Press the metal strip on both side with your fingers so that it fits the shape of your nose.
6. Pull the lower part of the mask down to completely cover the nose, mouth and chin.
7. While wearing and removing the mask, avoid touching the outer surface with your hands and, if necessary, wash your hands after touching the mask.